

”Krakken”



Montering og bruksanvisning **TS**
Transfer Sto 

Det er viktig å lese dette før du tar **TS** i bruk.

Krakken kan tippe sideveis eller bakover hvis du gir for mye trykk mot håndtaket eller ryggen i retning utover (fra deg). Se bilde.



Montering:

TS monteres enkelt ved å klemme inn den nedre knappen (fig.1) på benene, og sette de i festene på undersiden. Benet vris til det er låst.



Fig 1. Trykkes inn for å feste og utløse foten.

Ryggen og håndtaket monteres ved å klemme inn øvre knapp og plassere dem i hullene på oversiden av **TS**. Håndtaket kan monteres på høyre eller venstre side.

Ved demontering av **TS** snus enheten, knappene, fig 1, presses inn og benene kan tas av.

Ved demontering av rygg og håndtak presses knappen inn og rygg og håndtak kan tas av.

TS kan også leveres med en pute som gir litt trykkavlastning og som er vanntett.

Det kan også leveres en sekk for å gjøre transport og oppbevaring enklere.

TS mål, vekt.

Mål: Sammenlagt b 45 cm, d 32,5 cm, h 4 cm.

Oppslått b 52 cm, d 38 cm, h 49 cm.

Vekt: 2,8 kg.

Brukervekt: 120 kg.

Bruksanvisning pute.

Puten er laget av skum / luft. Med ventilen kan hardheten justeres. Den gir noe trykkavlastning, men er ikke en trykkavlastnings pute.


Når puten er pakket ut, må ventilen åpnes ved å skru den mot klokken. Puten vil da fylles med luft. Steng ventilen, skru med klokken. Sett deg på puten og slipp ut ønsket mengde luft.



Pute mål, vekt:

Mål: b 38cm, d 28cm, h 3,8 cm.

Vekt: 100 g.

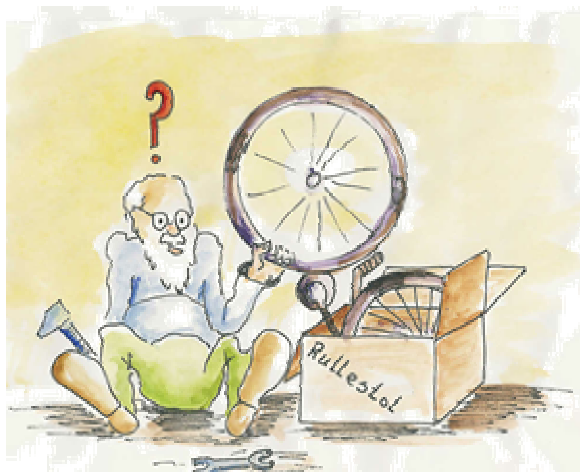

Produsent:

TS[®]
Transfer Sto[®]l

Gamle Bleikervei 33, N-1386 Asker

www.rullestol.no



Tlf. +47 911 76 250



Forhandler:

***molift*[®]**

Molift AS

Ole Deviks vei 44

N-0668 Oslo

Sentralbord: +47 4000 1004

Telefax: +47 4000 1008

www.molift.com