



# Varilite ProForm NX™

Varilite ProForm NX™ er et godt valg til brukere som trenger en optimal trykkavlastende pute. Brukerne har samtidig behov for lav vekt, stabil sitte- og forflytningsflate, ekstra hjelp til symmetrisk sittestilling med asymmetriske forutsetninger og minimalt med vedlikehold.

**Lav vekt, trygg- og stabil forflytningsflate, enkel tilpasning til utfordrende sittestillingsbehov, optimal trykkavlastning og god stabilitet kjennetegner Varilite ProForm NX™.**



- Base, luft/skum pute, lårpute og trekk
- **Base**
  - Fremmer symmetrisk sittestilling
  - Trekker ikke til seg fuktighet
  - Kan enkelt tilpasses
- **Avlastningspute**
  - Kombinasjon luft/skum
  - Leveres med 2 kammer
  - Enkel tilpasning til bekken skjevhet
- **Lårpute**
  - Gir ekstra fast underlag ved forflytning
  - Trekker ikke til seg fuktighet
  - Kan enkelt tilpasses
  - Kan eventuelt erstattes med avlastningspute
- **Trekk**
  - Lufttrekk som standard
  - Inkontinens trekk som tilbehør

## Størrelser og artikkelnummer:

| Størrelse  | Vårt   | NAV     | Størrelse  | Vårt   | NAV     |
|------------|--------|---------|------------|--------|---------|
| B x D      | art.nr | Hj.m.nr | B x D      | art.nr | Hj.m.nr |
| 30 x 35 cm | 72412  | 029962  | 43 x 43 cm | 77712  |         |
| 35 x 35 cm | 74412  | 029963  | 45 x 40 cm | 78612  | 029968  |
| 35 x 40 cm | 74612  | 029964  | 45 x 45 cm | 78812  | 029969  |
| 38 x 38 cm | 75512  |         | 45 x 50 cm | 78012  | 029970  |
| 38 x 43 cm | 75712  |         | 50 x 40 cm | 70612  |         |
| 40 x 40 cm | 76612  | 029965  | 50 x 45 cm | 70812  |         |
| 40 x 45 cm | 76812  | 029966  | 50 x 50 cm | 70012  | 029971  |
| 40 x 50 cm | 76012  | 029967  |            |        |         |



# Varilite ProForm NX™

**VARILITE®**

## Enkle tilpasninger for ulike utfordringer:




Rotert  
bekken



Hemiplegi/  
amputasjon



Ekstra  
adduksjon

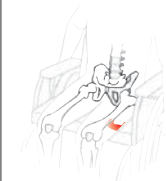

Ekstra  
avlasting



Ulik  
benlengde



## Enkelt i praksis:



Modifisering av puten er enkelt. Tilpassing for ekstra støtte eller for massive asymmetrier gjøres ved å bygge på eller skjære ut som vist på bildet.

Følg gjerne de opptrukne linjene på undersiden av puten.

Tilpassing av trekket gjøres når tilpassing er utført ved å bruke medfølgende velcro.

## Tilbehør til Varilite ProForm NX™:

**Plansete**  
Finér



**Kile**  
Vannfast skum



**Skumplater**  
25 x 25 x 0,5 cm



**Plansete**  
Høyde- og vinkeljusterb



**panthera norge**

Panthera Norge AS  
Røykenveien 142 A  
1386 Asker  
[www.panthera.no](http://www.panthera.no)

Tlf: 90 24 55 55  
Faks: 66 78 11 40  
E-post: [post@panthera.no](mailto:post@panthera.no)

**VARILITE®**  
A Division of Cascade Designs, Inc.

4000 1st Avenue South  
Seattle, WA 98134  
Phone: (800) 827-4548  
Fax: (206) 343-5795  
[www.varilite.com](http://www.varilite.com)



© 2011 Cascade Designs, Inc.