



Meridian/ ProForm NX

Bruksanvisning

side 1

Takk for at du valgte Varilite!

Vi vet du vil bli tilfreds med kvalitet, effekt og design på ditt Varilite produkt. Varilites produkter tilbyr meget god trykkavlastning, stabilitet og posisjonering.

For å oppnå maksimal effekt av din Varilite pute bør du gjøre følgende:

1. Start med puten fylt med luft. For å fylle med luft: åpne ventilen ved å dreie den mot klokken.
2. Lukk ventilen ved å dreie den med klokken. Sett deg nå på puten.
3. Åpne ventilen ved å dreie den mot klokken inntil det kommer ut luft. Når du hører at det kommer ut mindre luft, stenger du ventilen ved å dreie den med klokken.
4. Hvis det er dager du ikke skal benytte puten, vennligst åpne ventilen ved å dreie den mot klokken. La puten fylles med luft med ventilen åpen natten over.



OBS! For å hindre at du sitter gjennom puten, må du aldri slippe all luft ut av din Varilite pute.

Putetrekkestens underside består av et anti-skli materiale for å sikre at puten ligger fast. Som ekstra sikkerhet er putetrekket påsydd ekstra velcro (borrelås) som kan festes på en Varilite Drop Base eller et Varilite plansete. Alle Varilite putetrekke er sydd slik at det er plass til Varilite plansete. Varilite plansete er en effektiv og billig løsning for å øke brukerens sittebalanse, unngå skjevstilling i bekkenet, større ekstensjon av ryggraden og en generelt sett bedre sittekomfort.

For å sikre en lang levetid og optimal virkning av din Varilite pute:

Utsett aldri din Varilite pute for værforhold som ekstrem varme, kulde eller UV-stråler. Sjekk putens luftnivå daglig og hvis du skifter høyde (flytur eller er oppe i fjellet). Hvis puten punkterer eller hvis ventilen står åpen, vil puten tømmes under press.

Rengjøring:

Legg aldri din Varilite pute i vaskemaskinen. Puter og base kan tørkes av med et mildt rengjøringsmiddel oppløst i varmt vann. Varilite putetrekke bør vaskes slik som beskrevet på vaskeanvisning på trekket. Husk å trekke igjen glidelåsen før vask for å unngå at stoffet setter seg fast i glidelåsen. Vær sikker på at alle deler er helt tørre før du setter puten sammen igjen etter rengjøring. Varilite puter må ikke autoklaveres.

Varilite pute og trekk bør benyttes sammen. Trekket beskytter puten mot punktering, brennmerker og tilsøling. Trekket forbedrer trykkfordeling og luftsirkulasjon for å sikre en sunn hud.

Kontroller puten din regelmessig for å sikre optimal virkning og tilpasning.



Meridian/ ProForm NX

side 2

Reparasjon:

Alle Varilite produkter er konstruert av høykvalitets materialer som er motstandsdyktige mot punktering. Varilite putetrekk er spesielt designet for å hjelpe til med å beskytte luft-skum puten, og bør derfor alltid benyttes sammen med puten.

Skulle du få mistanke om punktering, flytt deg fra puten. Fyll den opp helt med luft og lukk ventilen. Flytt deg tilbake på puten. Hvis puten mister luft når ventilen er lukket, kan det indikere en punktering.

For å lokalisere en punktering, ta av putetrekket, fyll puten helt med luft og lukk ventilen.

Senk puten ned i et kar med rent vann og se etter luftbobler. Luftboblene vil avsløre hvor punkteringen er.. Kontakt din terapeut / hjelpemiddelsentral for å få puten reparert. Reparasjonssett finnes til Varilite putene.

Regelmessig ettersyn:

Puten bør ettersees regelmessig , kvartalsvis , for å oppdage / reparere eventuelle oppståtte skader i trekk på luft / skumbasen og ventil. Samme sjekk bør også foretas med hensyn til putens ytter/overtrekk , eksempelvis sømmer og glidelås. Ellers anbefales regelmessig rengjøring som beskrevet nedenfor og på putens / trekkets merkelapper.

ADVARSEL:

Hvis du skifter setepute, kan det være nødvendig med mindre justeringer på rullestolen din. Velcrotrekket, i rygg og sete, og evt. belter kan variere noe og skal tilpasses for korrekt funksjon.

Sjekk derfor alltid: skulderposisjon, setehøyde, setedybde, fotstøtte, armlen og rygg-/ setevinkel. Det anbefales at du kontakter din terapeut / hjelpemiddelsentral for å få hjelp med disse tilpasningene.

Det bør regelmessig kontrolleres for rødme på huden, spesielt rundt beinete områder (f.eks. sitteknute, halebein, m.m.). Kontakt lege straks ved vedvarende rødme i huden.



4000 1st Avenue South
Seattle, WA 98134
Phone: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.varilite.com

Authorized EU Representative:
Cascade Designs, Limited
Dwyer Road, Midleton, Co. Cork
Republic of Ireland



©2006 Cascade Designs, Inc.

Panthera Norge AS
Røykenveien 142 A
1386 Asker

Tlf: 90 24 55 55
Faks: 66 78 11 40
www.panthera.no