



V-Trak Original & V-Trak Lite festebeslag

V-TRAK

Enkel innfesting for presis posisjon av V-Trak rygger





PERFORMANCE
HEALTH PRODUCTS

V-TRAK

V-Trak Original & V-Trak Lite festebeslag

Enkel innfesting for presis posisjon av V-Trak rygger

Enkel montering




Monter festebakettene
på rygggrørene



Sett festebeslaget på
ryggskinnen



Fest rygg med beslag til
brakettene med hurtigkoplingene

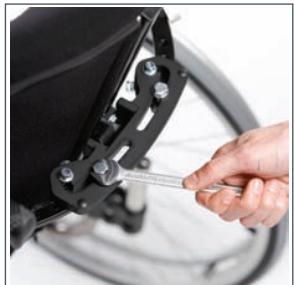

Klar til justering




Ferdig!

V-Trak Trinnløs posisjonering




Dybdejustering

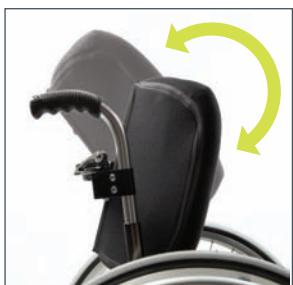

Vinkeljustering



Høydejustering

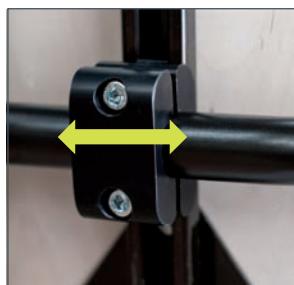


Sideveis justering



Rotasjon

V-Trak Lite størrelser

V-TRAK LITE

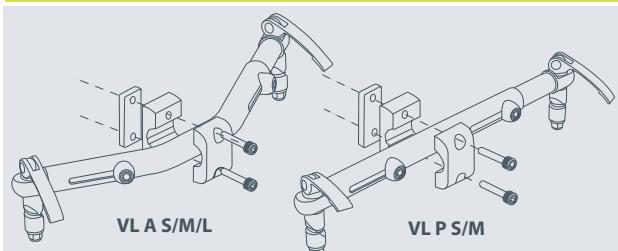


ART NR	Anbefalt setebredde mrs (cm)
VLPS	24 - 33
VLPM	32 - 36
VLAS	36 - 41
VLAM	42 - 46
VLAL	45 - 50

Bredden som anbefales er ved bruk av braketter til runde ryggrør

V-Trak Original størrelser

V-TRAK ORIGINAL

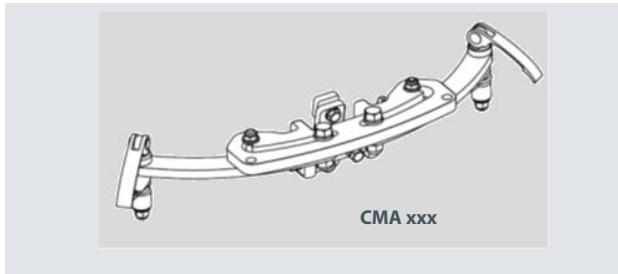

ART NR	Anbefalt setebredde mrs (cm)
CMA 100	27 - 34
CMA 125	35 - 38
CMA 150	39 - 42
CMA 175	43 - 46
CMA 200	47 - 51
CMA 225	52 - 56
CMA 250	57 - 62

Bredden som anbefales er ved bruk av braketter til runde ryggrør

V-Trak Egenskaper



Rask montering



Trinnløs justering



Justering om 2 akser og i 3 plan



Justerbar for
vekst



Alle rullestoler
manuell og el



Crash testet
ISO 16840-4



Enkel
justering



Passer spesial
rygger

Produsent:

PERFORMANCE HEALTH PRODUCTS LTD

WALES, UK

WWW.V-TRAK.COM

Distributør i Norden:

PANTHERA NORGE AS

Røykenveien 142A, 1386 Asker

NORGE

Tlf: 90 24 55 55

e-post: post@panthera.no

www.panthera.no