



### KRYCKKÄPPSHÅLLARE S3

Monteringsanvisning för:  
Kryckkäppshållare S3  
art.nr. 9900301

**OBS!** Monteringen kan variera beroende på modell av krycka.

Verktyg som behövs:

Liten krysskrummejsel




Länk till  
monteringsvideo



Länk till  
bruksanvisning




1) Ta isär kryckan.

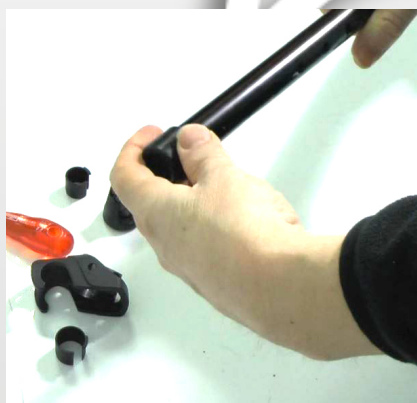

2) Lossa på plasthylsan från den övre delen av kryckan. Oftast gängad på plats.




3) Trä på det övre fästet. Om röret på kryckan är för smalt kan man använda de medföljande plastbussningarna och montera fästena på dem.

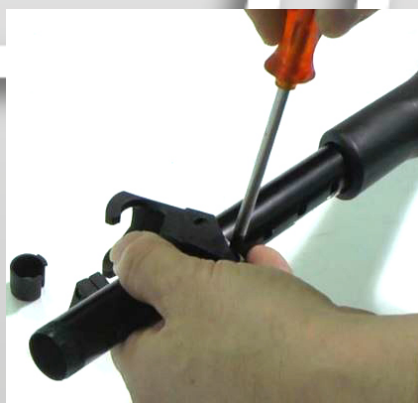

4) Drag åt skruven på fästet lite lätt med liten krysskrummejsel.




5) Montera tillbaka plasthylsan.

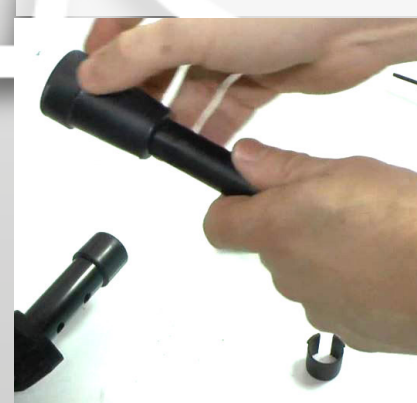

6) Tag bort gummifoten på den undre delen av kryckan.



7) Trä på det undre, magnetiska fästet, på den undre delen av kryckan. Om röret på kryckan är för smalt kan man använda de medföljande plastbussningarna och montera fästena på dem. Drag inte åt skruvarna än.

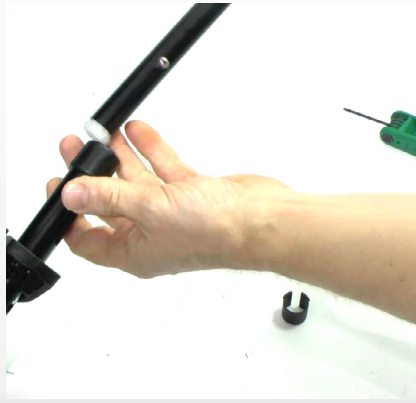

8) Montera ihop kryckan.



9) Häng kryckan med det övre fästet på ryggbågen. Vrid på kryckan så att handtaget pekar bakåt, från rullstolen.



10) Drag åt skruvarna på det övre fästet växelvis med en liten krysskruvmejsel. Använd måttlig kraft vid åtdragning.



11) Justera in den nedre magnetiska fästet i höjd så att det ligger mitt för röret på chassit.



12) Drag åt skruvarna på det nedre fästet växelvis med en liten krysskruvmejsel. Använd måttlig kraft vid åtdragning.



13) Fäst kryckan med det färdigmonterade fästet på rullstolen. Upprepa proceduren på en eventuell andra krycka.