

Nyhetsbrev 29. januar 2019

VARILITE ZOID

Zoid sittepute har byttet ventil. Putene har tidligere hatt PSV ventil, men de er nå byttet ut til standard ventil.

Varilite Zoid med standard ventil innstilles enkelt av bruker eller hjelper ved å slippe luft ut av ventilen i forkant av puten. Ekstrautstyr eller verktøy er ikke nødvendig og innstillingen gjøres mens brukeren sitter på puten. Dersom man ønsker å innstille puten på nytt kan man åpne ventilen og la puten fylle seg selv i løpet av 30 sekunder. Ventilen stenges og man kan starte innstillingen på nytt.



Det er fortsatt mulig å bestille Zoid med PSV ventil. Da må PSV ventilen bestilles på art.nr. 03682 / NAV hj.m.nr. 232565. Vi bytter ventilen kostnadsfritt. Det må bemerkes på bestillingen dersom PSV ventilen skal monteres av oss.

Nedenfor er nye art.nr. på Zoid sittepute med standard ventil:

Art.nr.	Varetekst	NAV hj.m.nr.
73000110101	Varilite Zoid b25 d25	249400
73000112081	Varilite Zoid b30 d20	249401
73000112121	Varilite Zoid b30 d30	023263
73000112141	Varilite Zoid b30 d35	023264
73000114141	Varilite Zoid b35 d35	023265
73000114161	Varilite Zoid b35 d40	023266
73000114181	Varilite Zoid b35 d45	249406
73000115151	Varilite Zoid b38 d38	249407
73000115171	Varilite Zoid b38 d43	249408
73000116161	Varilite Zoid b40 d40	023267
73000116181	Varilite Zoid b40 d45	249410
73000116201	Varilite Zoid b40 d50	249411
73000117171	Varilite Zoid b43 d43	249412
73000118161	Varilite Zoid b45 d40	249413
73000118181	Varilite Zoid b45 d45	023268
73000118201	Varilite Zoid b45 d50	249415
73000120161	Varilite Zoid b50 d40	249416
73000120181	Varilite Zoid b50 d45	249417
73000120201	Varilite Zoid b50 d50	249418