


Monteringsanvisning för Gearwheel

**Adaptersats för
Panthera Carbon Standard
Art nr. GW3012K**



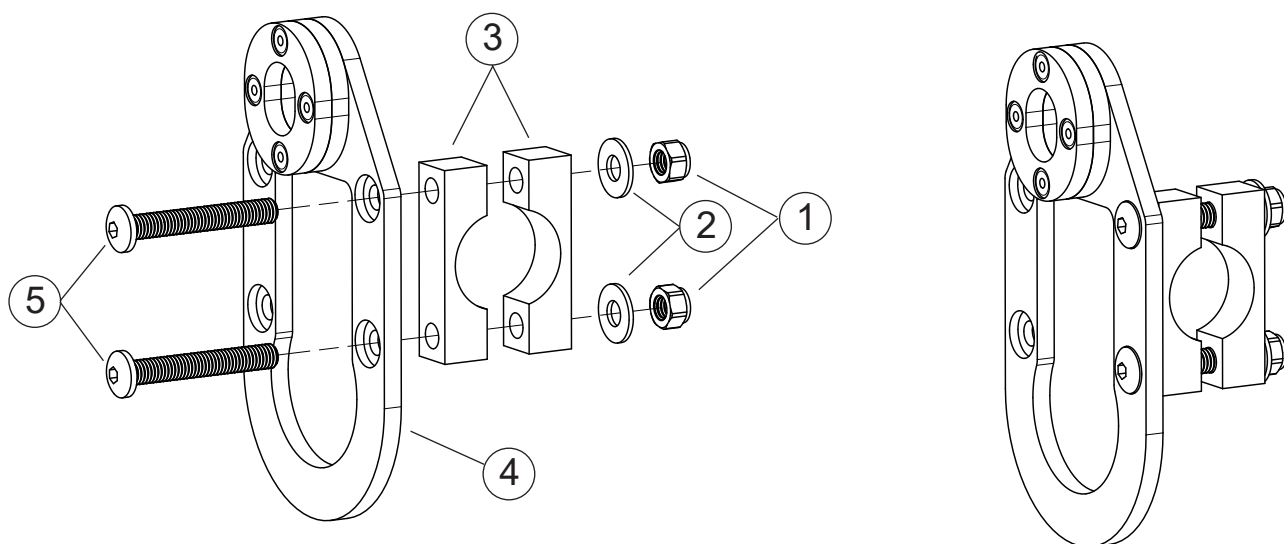

Part List			
Pos.	Art.	Description	Remark/Qty
1	GW50101	M5 Lock Nut	4
2	GW50062	Washer M5 FZB	4
3	GW50044	Clamp Panthera	4
4	GW30052	Bracket S2 S3 U2 U3	2
5	GW50102	M5x35	4

Verktyg för montering

Insexnyckel 3 mm

Hylsnyckel 8 mm

Kontrollera att alla delar finns med

Se "Part list"

Montering

- Montera skruvar genom adaptern och in i första klämman. Se bild 1.
- Montera adapter på axeln. Se bild 2.
- Montera andra klämman, bricka samt mutter. Se bild 3.
- Tänk på att det ska sitta en klämma på vardera sida av axeln.
- Dra åt skruv och mutter. Använd insexnyckel 3 mm och hylsnyckel 8 mm.
- Se till att skruvar är åtdragna så att adaptern inte rör sig.
- Kontrollera att adaptrarna sitter rätt genom att montera GEARWHEELS hjul och att piggen på hjulet passar i adapter. Se bild 4.



Bild 1: Adapter



Bild 2: Adapter monterad

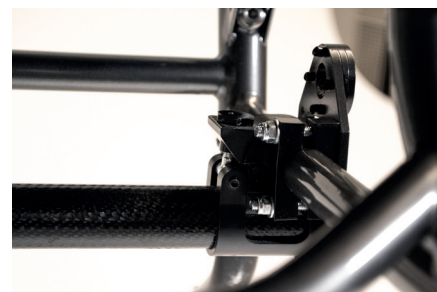


Bild 3: Adapter monterad på insidan



Bild 4: Passning med hjul

Montering och justering av Låsarm

Justera Låsarmen till ett läge som gör det lätt för brukaren att använda växelspaken.
Fixera Låsarmen genom att skjuta den in mot navet.



Lås Låsarmen med medföljande spärring använd lämplig tång.
Säkerställ att spärringen monteras korrekt i det avsedda spåret.

