

Nyhetsbrev 12. juni 2019

PRODUKTNYHETER

Drivhjulvelgeren

Vi har utviklet et unikt verktøy som gjør det enda enklere å finne riktige drivhjul til rullestolen.

Nå kan man bare krysse av de ønskene man har og som resultat får man et komplett drivhjul med artikkelnummer. Man får også hjelpemiddelnummer hvis dette er registrert.

På nettsiden finner du alt fra størrelse, hjultype, eiker, dekk og drivringer. Her finner du også detaljert informasjon om de enkelte delene som gjør drivhjulet komplett.

DRIVHJULSKJEMA

DRIVHJULVELGER

Velg hjuldiameter i tommer

Velg hjulmodell/Type

☐ Panthera Standard

☐ Panthera Spinergy X

☐ Spinergy Spox std

☐ Spinergy Spox Sport

☐ Spinergy Spox LX

☐ Spinergy Spox SLX

☐ Mountain Bike MTB

Velg eiketypen

Brukermanual på arabisk og somalisk

Vi har nå brukermanual for alle rullestollene på arabisk og somalisk.

Dette er en kortversjon av bruksanvisningen, og den inneholder informasjon om håndtering, sikkerhet og vedlikehold.

الاستخدام

عندما تحتاج إلى نقل الكرسي في سيارة، اخلع عجلات القيادة وقم بطي ظهر الكرسي إلى الأمام وارفع الأجزاء داخل المركبة.

الشكل 1: المرسوم

إزالة عجلات القيادة

يمكن إزالة عجلات القيادة عن طريق الضغط لأسفل على الزر الموجود في مركز العجلة، انظر الشكل 1. يمكنك بعد ذلك سحب العجلات للخارج بشكل مستقيم. لإعادة تركيب العجلات مرة أخرى، اضغط أولاً على الزر لأسفل، ثم قم بتركيب العجلات في مكانها. حذر الزر وقم بسحب العجلات للخارج للتأكد من تركيب العجلات بشكل صحيح وخروج الزر.

الشكل 2: طي ظهر الكرسي

طي ظهر الكرسي

بإمكانك طي ظهر الكرسي عن طريق سحب حبل (1) قفل الظهر (انظر الشكل 2) ثم طي ظهر الكرسي (2) للأمام/للأسفل. قد تحتاج أولاً إلى إزالة وسادة المقعد والواقيات الجانبية قبل طي ظهر الكرسي. لجعل طي ظهر الكرسي في الوضع القائم، تحتاج فقط إلى فردته حتى النهاية ويقوم قفل الظهر تلقائياً بقفل طي ظهر الكرسي في الوضع القائم. لا توجد ميزة قفل الظهر في الطرازين U3 Light و Panthera X. يتم طي الظهر للأمام بدون فتح أي أقفال.

panthera norge

Røykenveien 142A • 1386 Asker • panthera.no • Tlf: 90 24 55 55