

MONTERINGSANVISNING

Hoftebelte Y-modell



Hoftebelte Y-modell ovenfra



Hoftebelte Y-modell fra siden.



Hoftebelte strammes og/eller løsnes i endebåndene.

Montering og justering av innfestingsbraketter

Innfestingsbrakett - Hoftebelte Feste **bak** Panthera Y-modell/Enkel artnr: 990 02 47

Innfestingsbrakett - Hoftebelte Feste **foran** Panthera Y-modell artnr: 990 02 48

Monteringsbrakettene er montert på rullestolen når den blir levert. 2 stk på bakre rammerør og 2 stk på henholdsvis høyre og venstre siderammes nedre rammerør.

Brakettene som er montert på siderammen kan justeres frem og tilbake for å sikre ønsket vinkel på det fremre båndet på hver side av 4 pkt. hoftebelte. Bruk 3 mm unbrakonøkkel og 8 mm fastnøkkel for å utføre justeringen.

Utstyr og verktøy



Bolt m5 x 35. skivehodet

Klemme til rygginnfesting, u2 light art nr: 4601130

Distanser til ryggglås, art nr: 4101004

Skive 5,3 x 15 x 1,2 mm

Innfestingsøre

Skive 5,3 x 15 x 1,2 mm

Låsemutter M5



8 mm fastnøkkel
3 mm unbrako

Bakre innfestingsøre er montert på utsiden av braketten med innfestingssporet for hoftebeltet vinklet innover. Innfestingsbraketten plasseres 20 mm fra tippesikringsrøret.



1) Bakre rammerør

Hold klemmen på bakre tverrør i ønsket posisjon, med det store hullet innover.



2)

Plasser distansestykker inn i klemmen slik at de følger bøyen på rammerøret.



3)

Plasser innfestingsøret til belte på bolten slik at den skrår innover. Bolten og innfestingsøret settes så inn fra utsiden (det lille hullet)



4)

Plasser stor skive og liten skive på innsiden, slik at den dekker hullet på klemmen.



5)

Låsemutter påføres og strammes med skiftenøkkel på innsiden og unbrakonøkkel på utsiden til den sitter fast.



6)

Sånn ser den ut fra innsiden når du er ferdig



7)


Sånn ser den ut fra utsiden når du er ferdig

Fremre innfestingsøre er montert på innsiden av braketten med innfestingssporet for hoftebeltet vinklet utover. Innfestings braketten plasseres 135 mm fremfor tippesikringsrør målt på oversiden av rammen.



8) Feste sideramme

Hold klemmen rundt rammerøret på stolen i ønsket posisjon, med det store hullet innover.

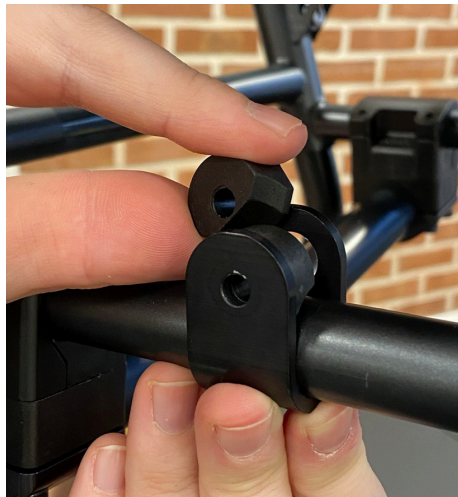

9)

Plasser distansestykker inn i klemmen slik at de følger bøyen på rammerøret.



10)

Sett i bolten fra utsiden (det lille hullet).



11)

Legg på stor skive på baksiden, slik at den dekker hele hullet på klemmen.



12)

Deretter plasser innfestingsøret til beltet og liten skive på innsiden slik at innfestingsøret skrår utover.



13)

Låsemutter påføres og strammes med skiftenøkkel på innsiden og unbrakonøkkel på utsiden til den sitter fast.



14)

Sånn ser den ut fra innsiden når du er ferdig



15)

Sånn ser den ut fra utsiden/ovenfra når du er ferdig.

Belteposisjon

Den anbefalte beltevinkelen er 30° - 45° fra setet, slik at trykket fra polstringene på beltet går like mye ned mot setet som bakover mot ryggen. De to bakre båndene på hoftebeltet skal ha fri bane mellom setepute og ryggtrekk og føres på innsiden av rygggrørene på rullestolen. Da sikrer man en kroppsnær tilpasning som fordeler trykket fra hoftebeltet på en hensiktsmessig måte.

NB! Det er viktig at polstringene på beltet trykker ned mot lårene slik at man unngår trykk mot bløtdelene på buken til brukeren. Hvis trykket ned mot lårene er for lite bør de fremre båndene på hoftebelte strammes.



Innfestingsbrakett bakre rammerør



Innfestingsbrakett sideramme