



made in Sweden

**LL65100 Fyrspann** – lyftremmar inkl karbinhakar – avsedda att kopplas till personlyftar med flera krokar och kombineras med bärsitsen/lyftselen Lätta Lyft. Hakarna är av bästa kvalitet, används av bergsklättrare. Information om vilka kombinationer som är godkända finns på webbversionen, Kombinationer lyftselar – personlyftar, [www.hmcv.se](http://www.hmcv.se)




### Så här används Fyrspannet

Justera sittställningen genom att flytta hakarna upp eller ned i öglorna som finns på remmarna. Om du vill sitta rak i ryggen eller luta bakåt beror på vilka öglor du väljer. **Prova dig fram till rätt sittställning.** Det ska kännas säkert och skönt.

Öglorna ska sitta utåt på Fyrspannet i förhållande till kroppen. Den släta sidan ska ligga inåt. För att inte remmarna bak ska trycka finns skydd som kan flyttas i höjdlid. När höjd och lutning är inställda och sittställningen känns bekväm ska remmarna helst hänga kvar i personlyften. Då är det enkelt att koppla ihop Fyrspannet med handtagen i Lätta Lyft bärsits/lyftsela som du redan sitter i.

Karbinhakarna sätts fast i lyftselens handtag med öppningen på haken framåt. De hakas på utifrån och in. Detta är viktigt, annars vrider sig remmarna inne i skydden och kan kännas.

Den längre delen på skydden ska täcka haken och ligga mot kroppen.

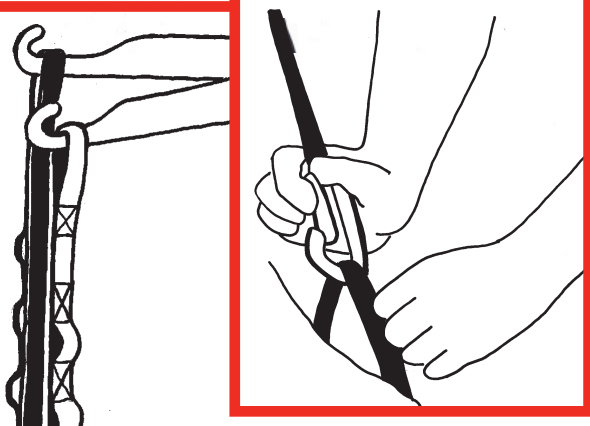

Fyrspannet används till personlyftar med byglar som har fler än två krokar.

Mer information finns att hämta under respektive rubriker på [www.lattalyft.se](http://www.lattalyft.se), [facebook.com/lattalyft](https://www.facebook.com/lattalyft) eller ring Svart på Vitt AB, 0302-468 40 Ulla Lindeberg..

Garanti 2 år från fakturadatum. Kontrollera att Fyrspannet inte får några defekter. Om skador uppstår ska remmarna bytas ut. Produkten är testad hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås. CE-märkt. Tillverkas i Sverige.

**Svart på Vitt Reklam och Design AB / Lätta Lyft made in Sweden**  
Box 4067 443 12 Gråbo Tel 0302-46840 +46 707 525820  
[www.lattalyft.se](http://www.lattalyft.se) [www.facebook.com/lattalyft](https://www.facebook.com/lattalyft)