



LL 45180 Bad S 33x33x33
LL 45190 Bad M 38x38x38
LL 45200 Bad L 43x43x43

Alla modeller finns med
bröst-/midjeband och
grenband – beställningsnr
se www.lattalyft.se

Lätta Lyft bärsits/lyftsele bad är stark och oöm. Lätt att vika ihop och ta med sig till stranden eller rehabassängen. Det glesa och starka materialet är perfekt för bad. Vid lyftet rinner vattnet ut direkt och bärsitsen torkar snabbt. För extra avlastning finns **Axelremmar** för manuella lyft som kan kopplas till bärsitsen. **Muddar** som kan sättas runt handtagen innebär ett mjukare grepp för de som lyfter. Badselen/sitsen kan också kopplas till personlyftar. Lätta Lyfts produkter testas hos **Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås** och de är CE-märkta.

Så här används Lätta Lyft bad

Lyftselen placeras i duschstolen eller rullstolen med **etiketten utåt och uppåt** i ryggen. Detta är viktigt för att lyftet ska bli rätt. Lyftselen håller för flera hundra kilo men hur tunga personer som kan lyftas beror på om lyftet görs manuellt eller vilka tillbehör som används. Kopplas bärselen till personlyft är det maxvikten på de olika fabrikaten som gäller. Vid manuella förflyttningar är det enkelt att förklara hur lyften ska utföras. "Ta i handtagen..." Lätta Lyft ska sträckas så långt som möjligt **fram mot knäveckan för bästa sittställning**, ligga rakt och mitt under brukaren.

Risken för ömmande leder eller sträckningar på grund av slarv och felaktiga lyft minskar. Ingen behöver halka och tappa taget om våta kroppar. Både brukare och assistenter känner sig säkrare. Den främre delen ska lyftas lite högre än den bakre för att brukaren ska känna sig trygg och i balans.



Det finns flera variationer av lyft

För personer med svaga muskler i nacken kan det vara en fördel att lyfta fram och bak. Då får huvudet stöd mot den som står bakom. I trånga passager och i trappor, är den tekniken att föredra. I andra situationer passar det kanske bättre att bära på varje sida. En lång och en kort person lyfter lika bra tillsammans som två jämnlånga. Man kan också vara tre eller fyra som lyfter, omständigheterna avgör.

Lätta Lyft badsitsar/selar tvättas i maskin 60 grader. Lufttorka.
Material nät, PVC/Vinyl. Garanti 2 år från fakturadatum.
Kontrollera att badselen inte får några defekter.
Om skador uppstår ska den bytas ut. Tillverkas i Sverige.

Svart på Vitt Reklam och Design AB / Lätta Lyft made in Sweden

Box 4067 443 12 Gråbo Tel 0302-46840 +46 707 525820

www.lattalyft.se www.facebook.com/lattalyft