

Lätta Lyft bärsits/lyftsele är mjuk, stark och oöm. Lätt att vika ihop och ta med sig. Insidan är glansig vilket är bra om du behöver hjälp att komma fram eller bak i stolen. Selen kan även beställas med matt insida eller båda sidor glansiga. Det blir inte varmt att sitta i Lätta Lyft bärsits under lång tid och man glider inte ur. För spastiska personer kan bröstband och grenband kännas som en säkerhet.

Så här används Lätta Lyft bärsits/sele

Lyftselen placeras i stolen med etiketten utåt och uppåt i ryggen.



Detta är viktigt för att lyftet ska bli rätt. Lätta Lyfts produkter testas hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås och de är CE-märkta.

Lyftselen håller för flera hundra kilo men hur tunga personer som kan lyftas beror på om lyftet görs manuellt eller vilka tillbehör som används. Kopplas bärselen till personlyft är det maxvikten på de olika fabrikaten som gäller.

På bärsitsen/selen finns fyra specialvävda, greppvänliga handtag.

Det är enkelt att förklara hur lyften ska utföras. "Ta i handtagen..." Lätta Lyft ska sträckas så långt som möjligt fram mot knäveckan för bästa sittställning och ligga rakt och mitt under brukaren. Detta för att få en bra balans vid lyftet.

Kläderna sitter på plats vid lyften och risken för ömmande leder eller sträckningar på grund av slarv och felaktiga lyft minskar. Den främre delen ska lyftas lite högre än den bakre för att brukaren ska känna sig säker och i balans.

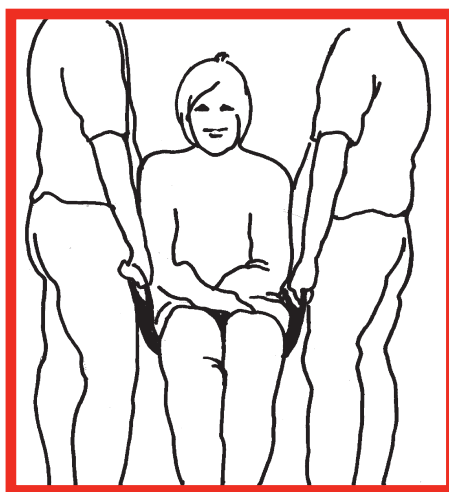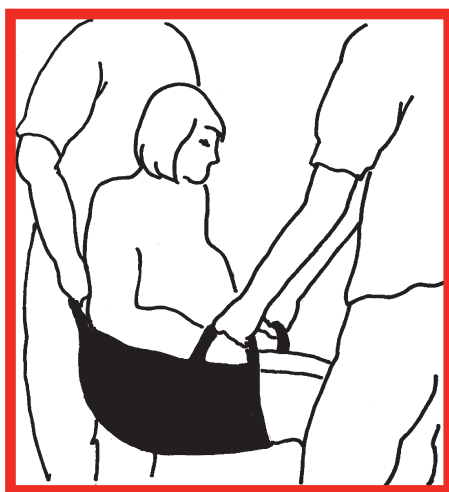

Det finns flera variationer av lyft

För brukare med svaga muskler i nacken kan det vara en fördel att lyfta fram och bak. Då får huvudet stöd mot den personen som står bakom. I trånga passager, på flyget och i trappor, är den tekniken att föredra. I andra situationer passar det kanske bättre att bära på varje sida. En lång och en kort person lyfter lika bra tillsammans som två jämnlånga. Man kan också vara tre eller fyra som lyfter, omständigheterna avgör.

Lätta Lyft bärsitsar/selar tvättas i maskin 60 grader. Vi rekommenderar 40 grader för längre livslängd och färgbeständighet. Sträck i banden efter tvätten och lufttorka. Material bomull/polyamid. Garanti 2 år från fakturadatum. Kontrollera att selen inte får några defekter. Om skador uppstår ska bärselen bytas ut. Tillverkas i Sverige.

Svart på Vitt Reklam och Design AB / Lätta Lyft made in Sweden

Box 4067 443 12 Gråbo Tel 0302-46840 +46 707 525820

www.lattalyft.se www.facebook.com/lattalyft