




Monteringsanvisning för: Bord S3


art.nr. 6810020 Bord S3

Max. belastning 10 kg


Verktyg som behövs:
Insexnyckel 4 mm

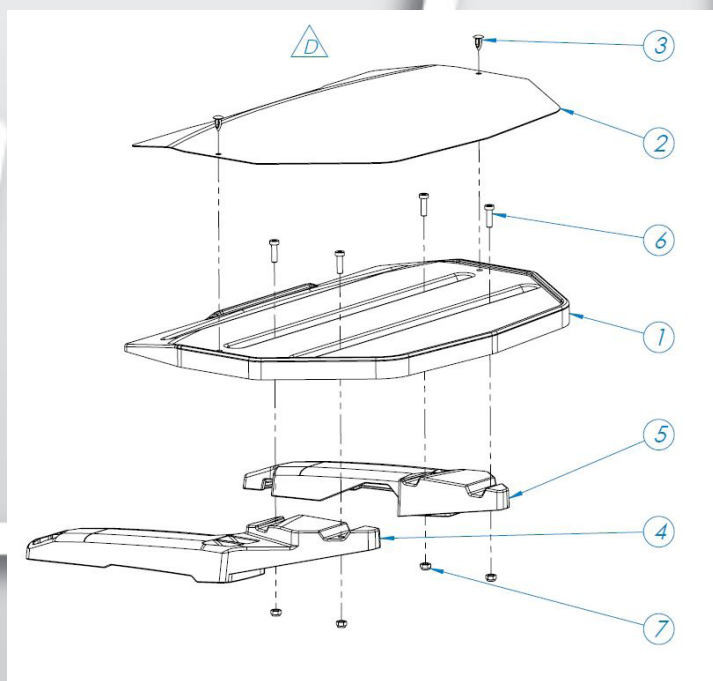

1. Sprängskiss Bord S3

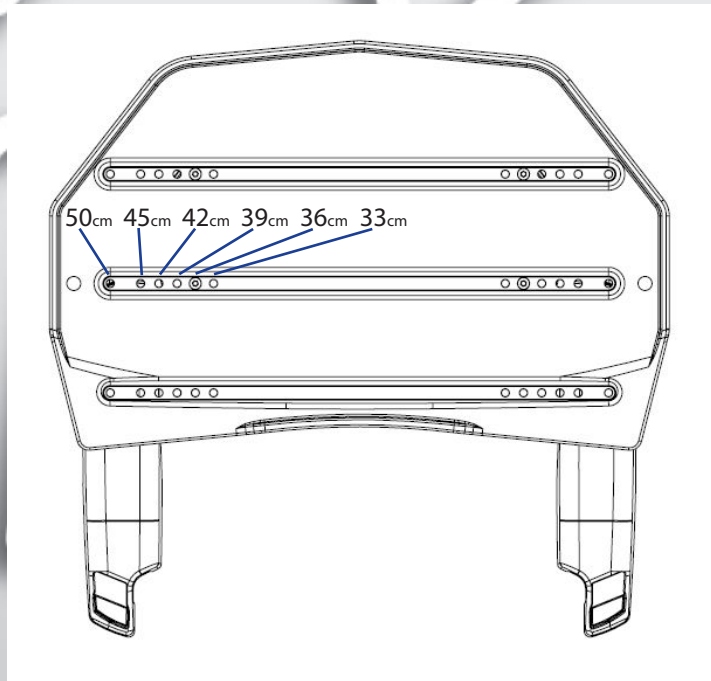


2. Välj önskat hål för stolsbredd och djupläge

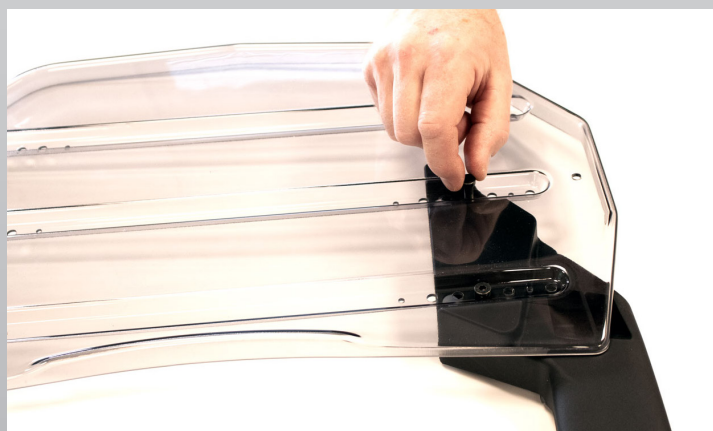

3. Placera bordets ena fästsida (4 och 5) i önskat läge. Sätt i bultar (6) från bordskivans (1) ovansida



4. Montera muttrarna (7) från undersidan. Dra åt bultarna, se till att de bottnar i spåret. Upprepa samma steg på andra sidan.

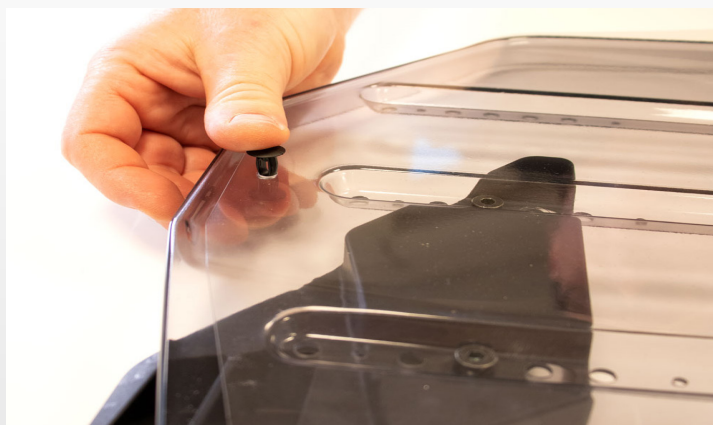

5. Dra bort skyddsplasten från den lösa täckskivan (2). Skivan placeras på bordet och fästs med medföljande svarta låsproppar (3) i motsvarande hål på bordsskivan.



Användning av bord

6. För att montera bordet på armstödet välj önskat djupläge på armstödet. Vinkla bordet uppåt, trä på fästsidorna på armstödet bakkant och lägg bordet på armstöden.

För att ta bort bordet, vinkla bordets framkant uppåt och pressa bordet lätt bakåt och neråt för att trä av den från armstödet.

keeps you moving


TABLE S3

Assembly instructions for:
Table S3


art.no. 6810020 Table S3

Max. load: 10 kg

Tools needed:
Allen key 4 mm

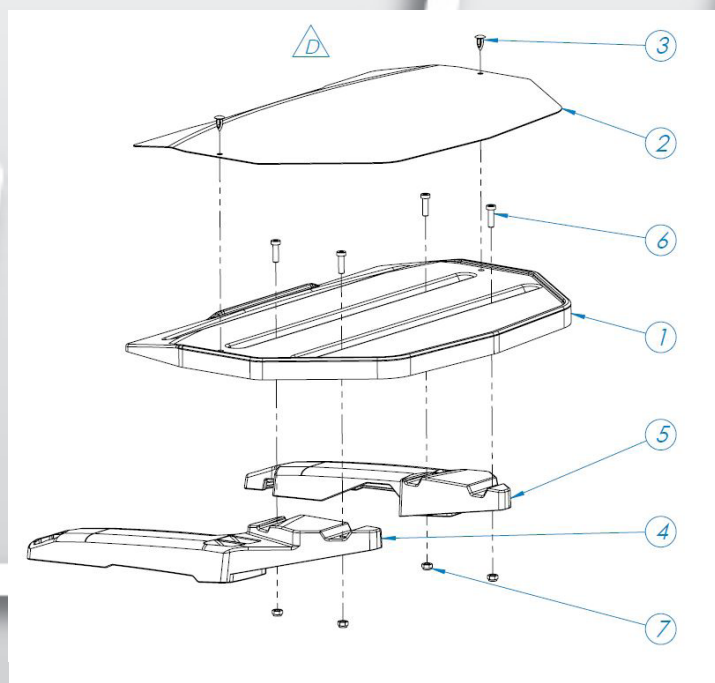

1. Exploded view Table S3

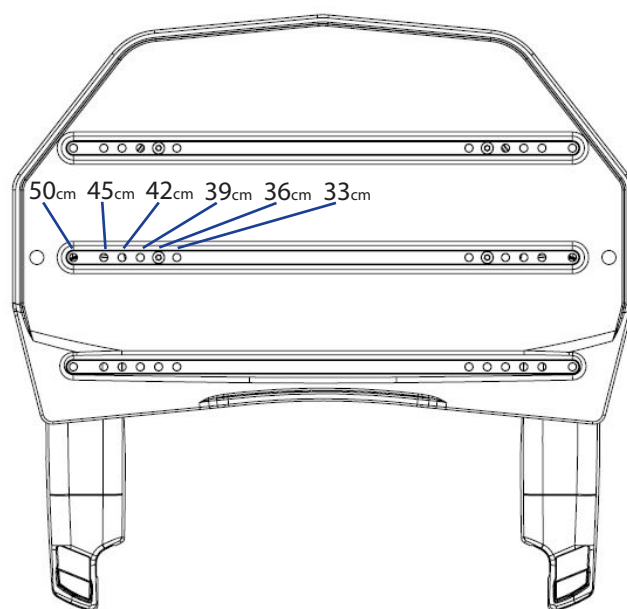

2. Choose desired width and depth position.




3. Place one of the tables attachments (4 and 5) in desired position. Place bolts (6) from tables (1) upper side.



4. Mount the lock nuts (7) from underneath. Tighten the bolts. Repeat same steps on the other side.

panthera®

keeps you moving

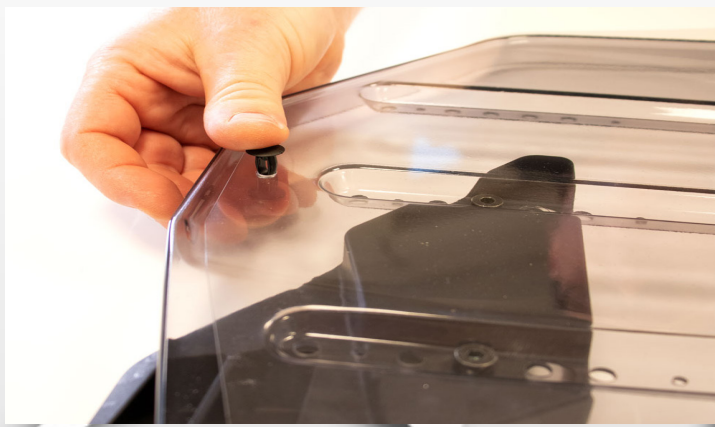

5. Remove the protective film from the loose cover top (2). The cover top is placed on the table and fastened with the supplied black locking plugs (3) in the corresponding holes on the table top.



Use of the table

6. To mount the table on the armrest, select the desired depth position on the armrest. Angle the table upwards, thread on the mounting sides on the back edge of the armrest and place the table on the armrests.

To remove the table, angle the front edge of the table upwards and press the table slightly backwards and downwards to slide it off the armrests.