



PANTHERA QUICK CONNECTOR – MOTOTRONIK

BRUKSANVISNING/MONTERINGSANVISNING

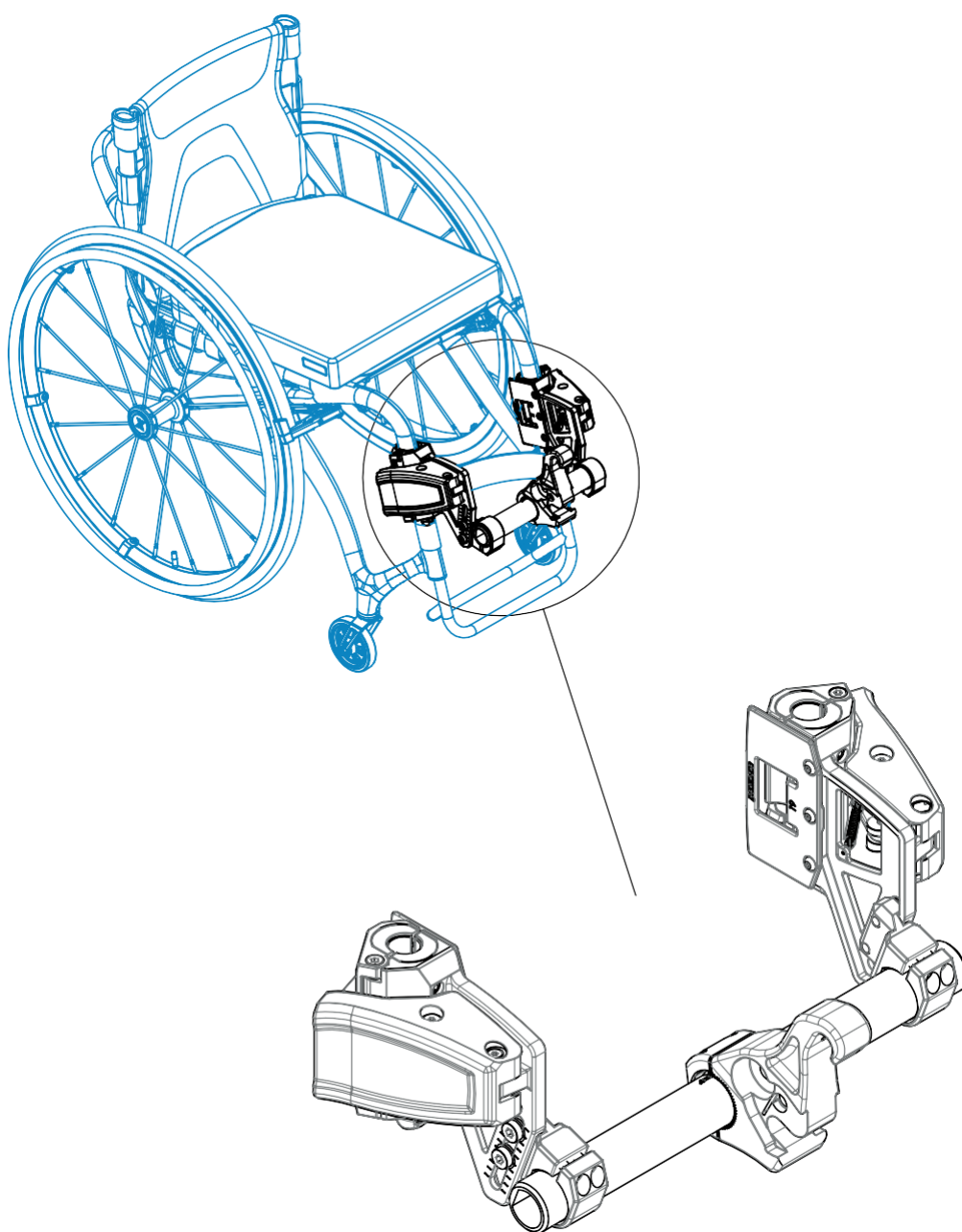

Innhold	side
Innledning	2
Kompatible modeller	2
Tiltenkt bruk og miljø for enheten	2
Symboler, sikkerhet, advarsler	3–4
Oversikt	4
Produktmerking	5
Enhetens levetid	5
Vedlikehold/rengjøring	5
Oppbevaring	5
Montere festet på rullestolen	6–8
Justere klemmekraften på festet	9
Skifte innsatser og fjærplate	10

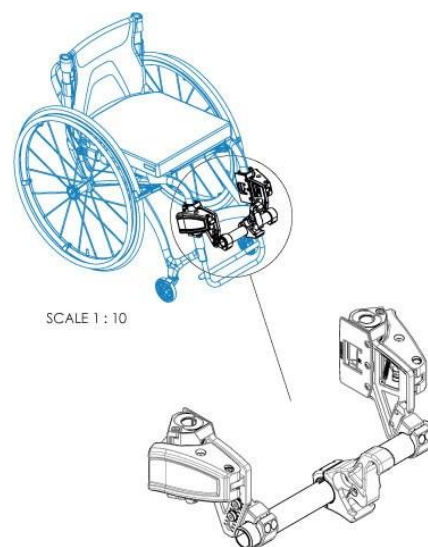

Innledning

Dette festet, Quick Connector, produseres av Panthera, slik at Mototronik drivaggregat kan brukes på våre rullestoler.

Ved levering må du kontrollere at emballasjen er fri for transportskader som kan ha skadet innholdet. Les bruksanvisningen nøye før du monterer og bruker dette festet.

Kompatible modeller

Quick Connector har en maksimal brukervekt på 120 kg.

Panthera X/X3, S3/S3 kort samt U3 og U3 Light (U3L) opp til sittebredde 42 cm har 100 kg brukervekt, og S3/S3 kort og U3/U3L opp til 45 cm 150 kg.

Quick Connector passer til rullestolmodeller:

Panthera S3/S3 kort, Panthera U3, Panthera U3L og Panthera X/X3 (se art.nr. nedenfor)

passer modeller og setebredde

Artikkelnr.	Beskrivende tekst	X/X3	U3/U3L	S3/S3 kort
9050050	Quick Connector Mototronik X L1 kbl	33, 36		
9050051	Quick Connector Mototronik X L2 kbl	39, 42		
9050052	Quick Connector Mototronik X L3 kbl	45		
9050053	Quick Connector Mototronik 19 L1 kbl		33, 36	
9050054	Quick Connector Mototronik 19 L2 kbl		39, 42	33
9050055	Quick Connector Mototronik 19 L3 kbl		45	36, 39
9050056	Quick Connector Mototronik 19 L4 kbl			42, 45

Tiltenkt bruk og miljø for enheten

Quick Connector er ment å brukes sammen med Mototronik for å feste Mototronik på Pantheras rullestoler. Ved kassering sorteres Quick Connector som metallsøppel.

Sikkerhetsmerknader

Quick Connector skal ikke brukes av barn eller personer med nedsatte kognitive evner.

Kontakt

Ved spørsmål eller hvis du trenger hjelp med produktet, skal du i første omgang kontakte din lokale leverandør (hjelpemiddelsentral). For å komme i kontakt med produsenten kan du se kontaktopplysningene nedenfor:

Panthera AB 08-761 50 40
 Gunnebogatan 26 www.panthera.se
 163 53 Spånga SE_Box_Spanga@permobil.com

Panthera AB, Gunnebogatan 26, SE-163 53 Spånga, Sweden, +46-8-761 50 40, www.panthera.se

Symboler

Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen og på etiketter:

	FORSIKTIGHETSREGLER: Farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade.		Artikkelnummer på etikett og revisjon
	Se bruksanvisningen for mer informasjon		Medisinsk utstyr
	Produsent		CE-merking
	Produksjonsperiode		
	Serienummer		
	Modell/artikkelnummer		
	Maks. brukervekt		

Sikkerhet: Advarsler og forsiktighetsregler



- Veltefare/fallfare

Når Mototronik festes på Quick Connector og veltebeskyttelsene er felt bort, er det stor fare for å falle bakover på innkoblingstidspunktet.

Hvis Quick Connector er feil innstilt eller montert på rullestolen, kan den løsne. Dette kan gjøre at Mototronik løsner under kjøring, og at brukeren dermed kan falle ut av rullestolen.

Les bruksanvisningen nøye.

Kjøring med Mototronik i høye hastigheter med skarpe svinger og harde oppbremsinger kan føre til at rullestolen velter. Det kan gjøre at brukeren faller ut av rullestolen med beina låst bak Quick Connector, noe som kan føre til alvorlige skader. Sørg for å kjøre i en hastighet som du behersker.

Hvis Quick Connector monteres for høyt på rullestolen, kan det føre til at svinghjulene treffer hindringer på bakken. Det kan gjøre at du faller ut av rullestolen. Hvis Quick Connector monteres for lavt på rullestolen, øker tippefølsomheten bakover. Dette kan forårsake fall bakover.

Les monteringsanvisningen nøye og bruk "Stoppetapp", **se pos. 4 på fig. 1** for å unngå feil montering på rullestolen.

Hvis det brukes veltebeskyttelse, skal lengden justeres ved behov. Husk at veltebeskyttelsen kan slå i underlaget nedover/oppover ulike hindringer/kanter.



- Skade

Ved kjøring med montert Quick Connector uten Mototronik er det fare for personskader ved kjøring uforsiktig og treffer personer i nærheten med Quick Connector.

Hvis Quick Connector løsnes før Mototronik løsnes, kan det oppstå personskader.

Quick Connector er ikke ment å stå eller klatre på. Den er heller ikke ment som løftehjelpemiddel.

Sikkerhet: Advarsler og forsiktighetsregler



- Montering/fall

Bruk av feil innsatser (A og B på figur 2) kan gjøre Quick Connector ustabil og føre til fall.

Les monteringsanvisningen nøye

Etter lengre tids bruk kan Quick Connector bli slitt og forårsake ustabil feste, noe som kan gjøre at du faller ut av rullestolen. Sørg for å kontrollere og vedlikeholde Quick Connector.

Les monteringsanvisningen nøye

Sørg for at låsespakene på Quick Connector-ene er helt lukket rundt rammerørene.

Les monteringsanvisningen nøye



- Annet

Oppbevaring.

Quick Connector skal oppbevares på et tørt sted ved romtemperatur når den **ikke** er i bruk. Annen oppbevaring kan skade Quick Connector og føre til at den ikke fungerer sikkert.

Funksjonskontroll


Utfør en funksjonskontroll av Quick Connector før første gangs bruk:

- Kontroller at bolter og skruer er delvis strammet, og at det ikke er synlige skader.
- Kontroller også innsatsene (A og B på fig. 2) og fjærplater (pos. 1 og 2 på fig. 1) for slitasjeskader som kan forårsake dårligere passform og stabilitet.
- Kontroller at Quick Connector sitter stabilt og ikke er løs.

Kontroller fjærplatens stivhet (pos. 1 og 2 på fig. 1) årlig. Stivheten kan bli redusert, noe som gjør at Quick Connector kan løsne og falle ned på foten.

Kontroller at riktig plate brukes til riktig rullestolmodell.

Oversikt

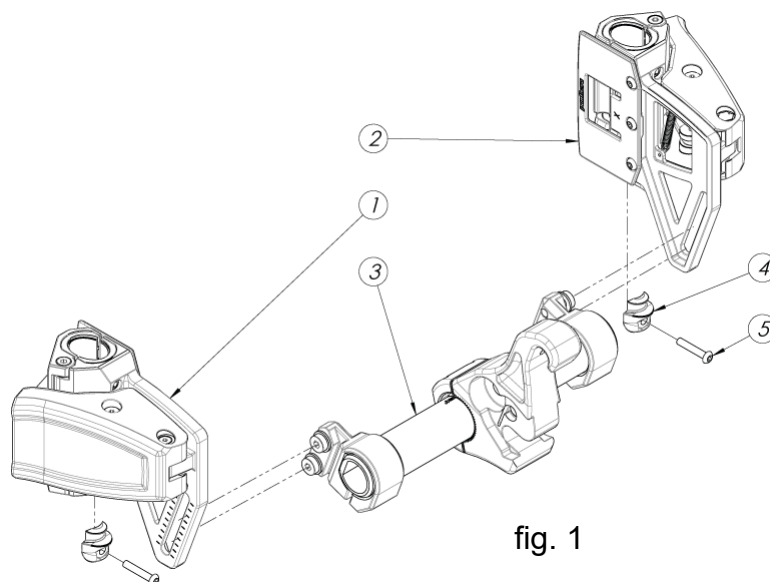

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Klemme QC Mototronik høyre kbl |
| 2 | Klemme QC Mototronik venstre kbl |
| 3 | Rørpakke QC Mototronik kbl |
| 4 | Stoppetapp |
| 5 | Bolt K6S |

OBS!

- Hvis det er monteret transportbeskyttelse rundt rammerørene på rullestolen, må de fjernes før Quick Connector monteres.
- Husk å koble fra Quick Connector før du begynner en forflytning til/fra rullestolen.

Livssyklus

Levetiden til Quick Connector avhenger av stell og vedlikehold.

Garanti

Vi gir 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

Oppbevaring

Quick Connector skal oppbevares på et tørt sted ved romtemperatur når den ikke er i bruk.



Vedlikehold/rengjøring

Quick Connector rengjøres best med en fuktig klut. Inspiser boltene og gjenneinnsatsene regelmessig. Hvis det oppdages feil og dere har spørsmål, må dere kontakte Panthera.

www.panthera.se

Plassering av etikett

Se side 3 for forklaring av symboler.

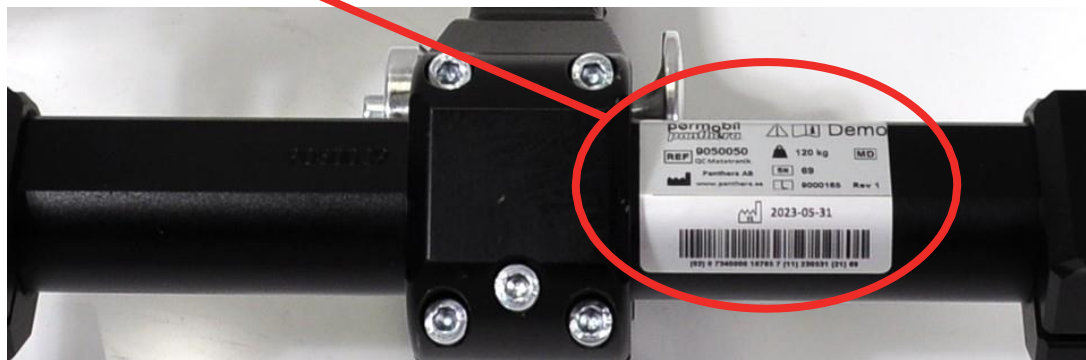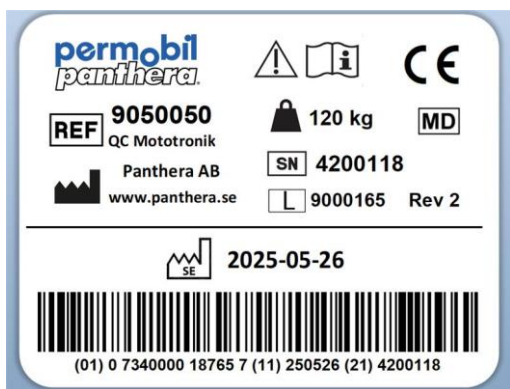



Monteringsanvisning for: Quick Connector

Passer til rullestolmodeller:

Panthera S3/S3 kort, Panthera U3, Panthera U3L og Panthera X/X3 (se art.nr. nedenfor)

artikkelnr.: **9050050** (X/X3 bredde 33, 36 cm), art.nr.: **9050051** (X/X3 bredde 39, 42 cm), art.nr.: **9050052** (X/X3 bredde 45 cm), art.nr.: **9050053** (U3/U3L bredde 33, 36 cm), art.nr.: **9050054** (U3/U3L bredde 39, 42 cm, S3 bredde 33 cm), artikkelnr.: **9050055** (U3/U3L bredde 45 cm, S3/S3 kort bredde 36, 39 cm), art.nr.: **9050056** (S3/S3 kort bredde 42, 45 cm)




Nødvendig verktøy: Unbrakonøkkel
3 mm, 4 mm, 5 mm, gummihammer
og dor

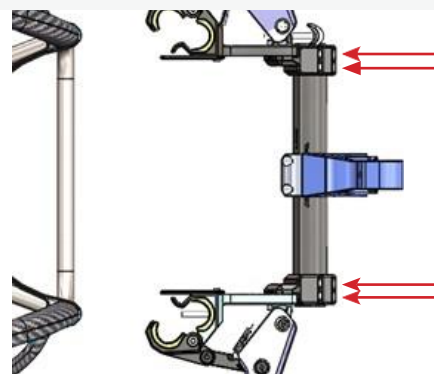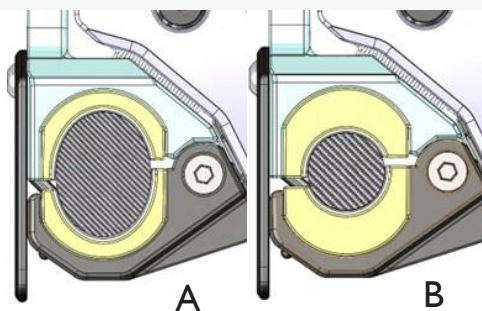

1) Fjern skruene som holder fotbøylen, og erstatt dem med de lengre skruene og stoppetappene.

2) Velg riktig type innsats (leveres med et sett) for ditt chassis.
Innsats A for Panthera X/X3 -chassis
Innsats B for Panthera U3/U3L - og S3/S3 kort - chassis

3) Løsne de 4 skruene i rørklemmene med en 5 mm unbrakonøkkel.

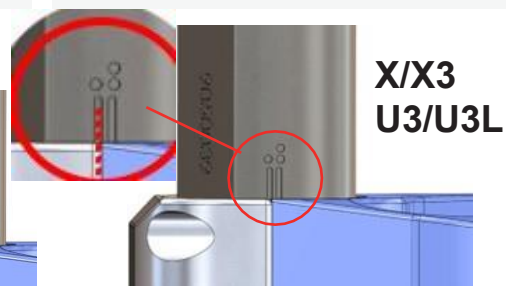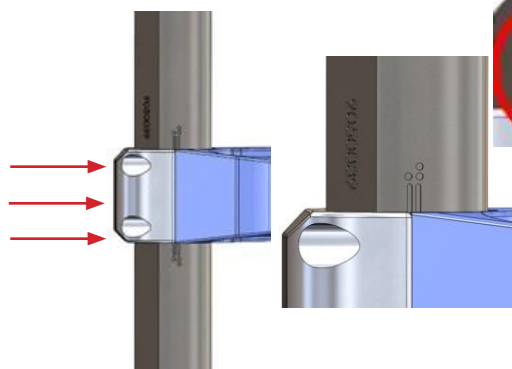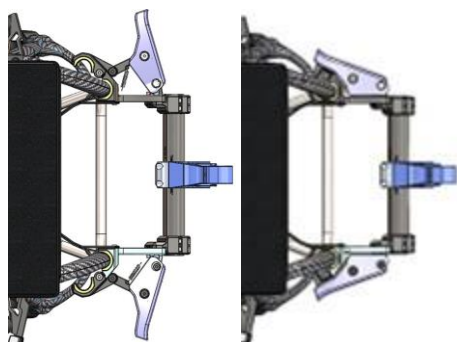


S3/S3 kort

4) Plasser Connectoren på rammen for å justere bredden, trykk Connectoren ned langs rammen til den stopper mot stoppknottene. Kontroller at kroken er sentrert, og at klemmene er symmetrisk plassert på rørdelen. Lukk spakene. Trekk til de 4 skruene. Denne innstillingen utføres best i en belastet rullestol.

5) Se følgende trinn for å justere vinkelen på kroken mellom S3/S3 kort - og U3/U3L/X/X3 - modellene:
a. Løsne de 4 "hjørne"-skruene, fjern den 5. sentreringsskruen helt med en unbrakonøkkel 4 mm.
b. Flytt kroken til den ene siden slik at den ikke kan låses i sporene (kan rotere).
c. Juster vinkelen slik at ønsket merke er rettet inn med sporet i klemmen (se figur 6).
d. Flytt nå kroken tilbake over sporene, monter den 5. skruen igjen og stram de resterende 4 "hjørneskruene" med en 4 mm unbrakonøkkel.


6) Velg et punkt ■ for X/X3 - og U3/ U3L-chassis.

Velg to ■ punkter for S3/S3 kort -chassis.

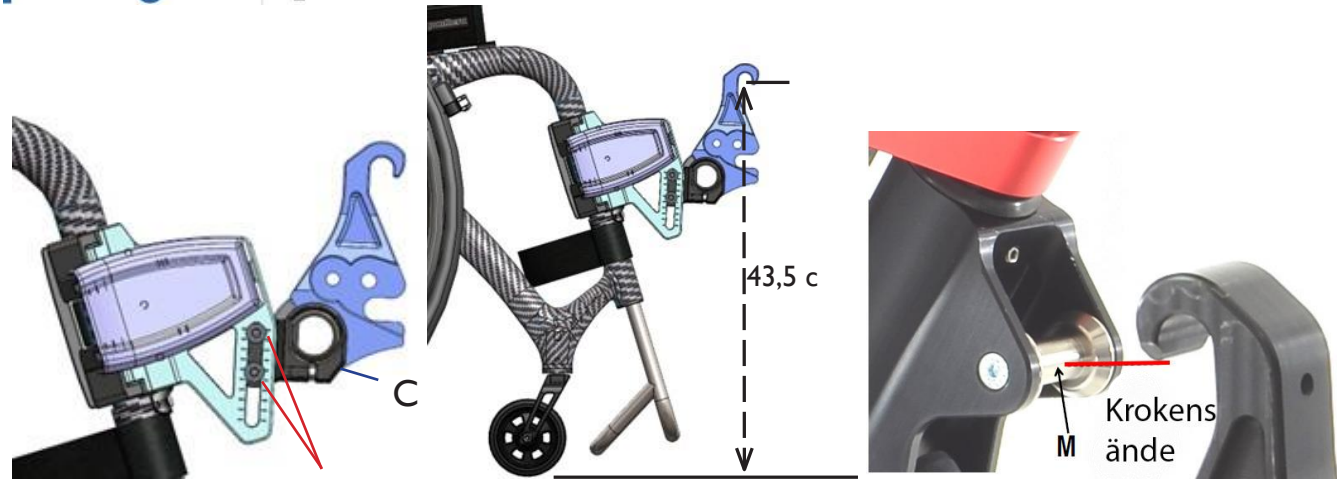


- 7) Høydejustering: MERKNADER:
Avhengig av modell og drivhjulstørrelse kan det være nødvendig å justere høyden slik at kroken havner i riktig høyde. Dette gjøres ved hjelp av de asymmetriske klemmene
- 8) A. Juster høyden slik at enden av kroken er nøyaktig 43,5 cm over bakken. Trekk til skruene.
- 8) B. Kontroller mot MotoTronik-enheten at enden av kroken er på linje med midten av aksel M.

Valg av posisjon for den asymmetriske klemmen

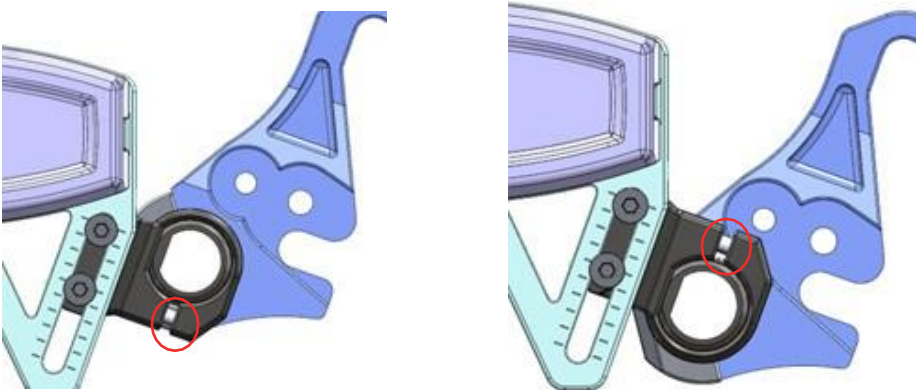


Posisjon for U3/U3L - og X/X3-chassis	
For 24" og 25" hjul	Til 26" felger

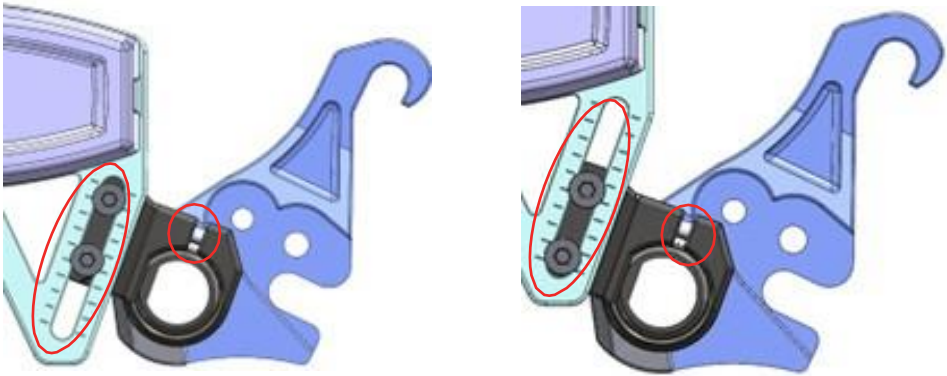


Posisjon for S3/S3 kort - chassis	
For 24" og 25" hjul	Til 26" felger


Koble til Quick Connector

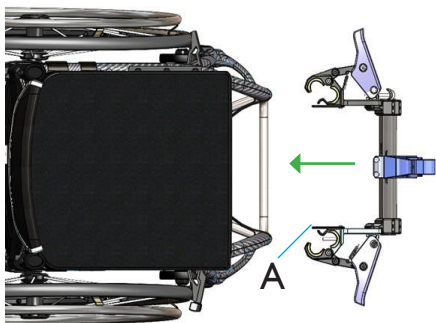

10) Sett deg i stolen og før Quick Connector mot de fremre profilene på chassiset. Fjærplaten (A) vil holde koblingen på chassiset slik at du kan justere håndtering/grep under denne prosedyren/handlingen.

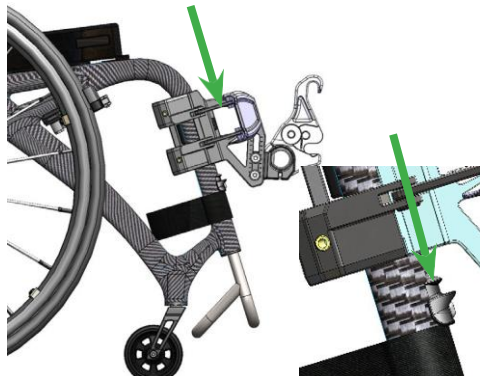

11) Før koblingen ned langs rammen, til den stopper mot stoppetappene, en "klikk"-følelse.

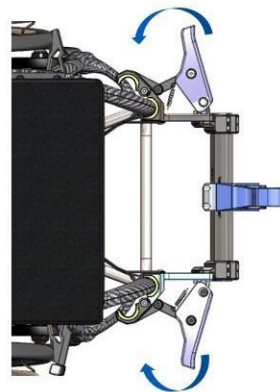

12) Lukk spaken på begge sider.

For å koble fra koblingen utfører du trinn 10 til 12 i motsatt rekkefølge, dvs. 12 til 10.




13) Når du lukker spakene, må du bruke kraft med åpen hånd på plastspaken.




14) Lås spaken med åpen hånd.

Vær forsiktig når du lukker klemmene på Quick Connector, for å unngå at fingre eller andre kroppsdeler kommer i klem.


Justere klemmekraften på Quick Connector-festet

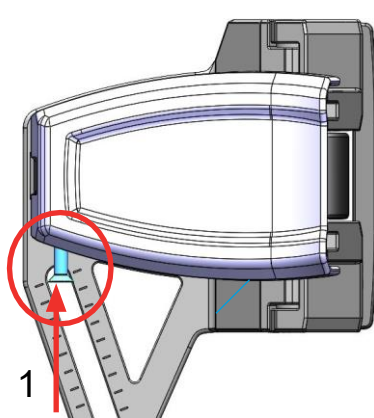

15) Slik justerer du klemmekraften til Quick Connector rundt rammerøret (4) på rullestolen:
Begynn med å løsne skruen (1) litt med en 3 mm unbrakonøkkel. Trykk deretter inn skruen slik at sekskanthodet (2) kommer ut på den andre siden.

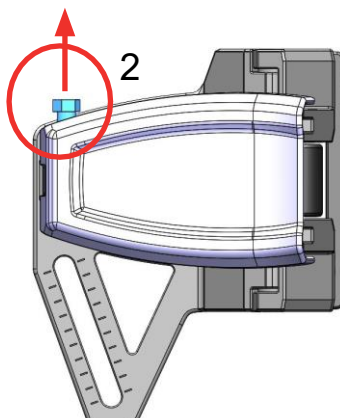


16) Nå kommer du til sekskanthodet og kan skru det med en 10 mm fastnøkkel/skiftenøkkel. Det er et innstanset merke på skruhodet (3). Ved å dreie skruhodet i ulike posisjoner får du ulike klemkrefter rundt rammerøret (4) på rullestolen.



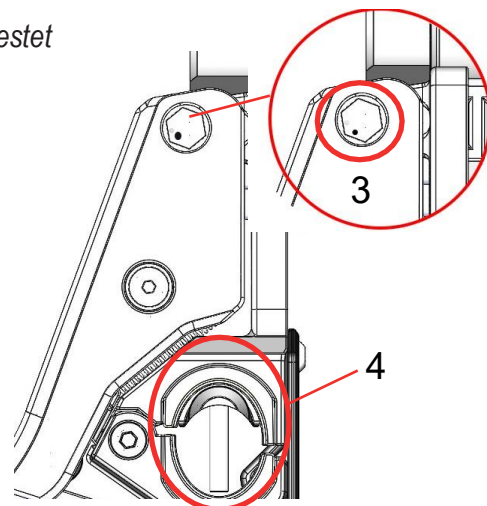


15) Hvis du ser på skruhodet ovenfra, er en posisjon på merket "klokken 7" ("klokken 5" på høyre feste) den løseste klemmekraften for klemmen (4). Posisjonen "klokken 1" ("klokken 11 på høyre brakett) er hardest. Juster skruen til ønsket posisjon og trykk den deretter tilbake i plastformen. Trekk til skruen (1). Gjenta prosedyren på det andre festet, slik at det blir likt på venstre og høyre feste.

Skifte ut fjærplate

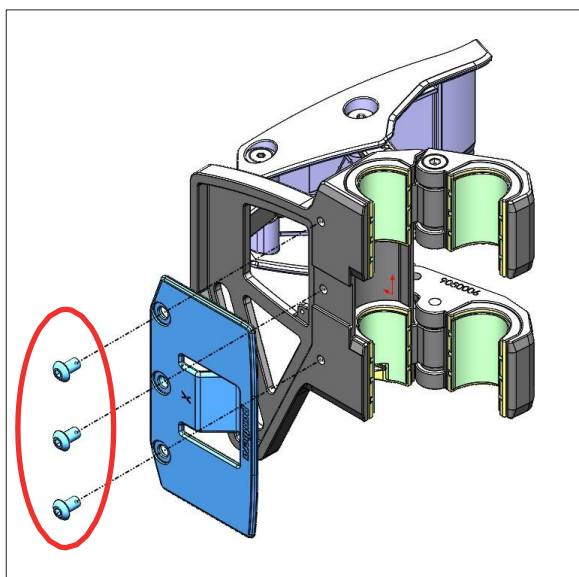


17) For å skifte ut fjærplaten må du først skru løs bolt 6003508 x 3. Den gamle fjærplaten fjernes (kastes) og erstattes med en ny plate. Fjærplate 19-rørprofil: 9050019 Fjærplate X-profil: 9050020

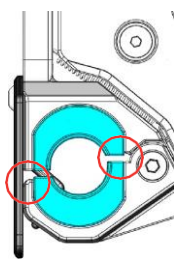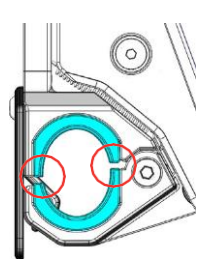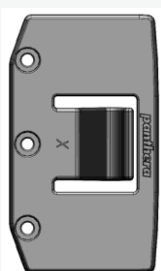
Fjærplate
rørX-profil Fjærplate 19-
rør

19 b). Pass på å snu "innsatsene" slik at sporene er på linje med sporene på braketten, se røde ringer på bildet.


Skifte ut innsatser

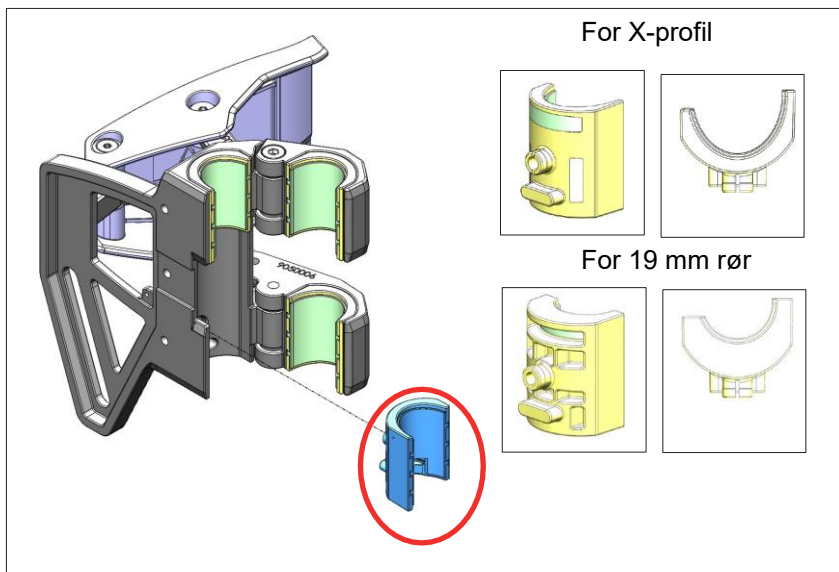

For X-profil

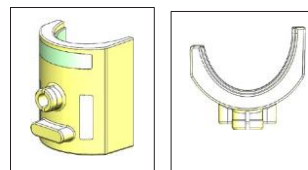


For 19 mm rør

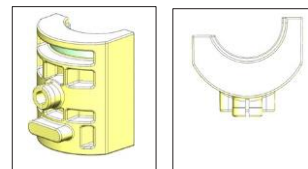


18) Skifte ut innsatser, høyre og venstre variant, 1 per side. Bruk en dor og en gummihammer til å banke ut innsatsene. Kast de gamle innleggene og erstatt dem med nye. Det skal klikke når de nye trykkes på plass. Kontroller at den nye har en jevn gummioverflate.

Innsatsklemme X-profil med glidestopp venstre: 9050022 Innsatsklemme X-profil med glidestopp høyre: 9050023 Innsatsklemme 19-rør med glidestopp venstre: 9050025 Innsatsklemme 19-rør med glidestopp høyre: 9050026


Symmetrisk utskifting av innsatser

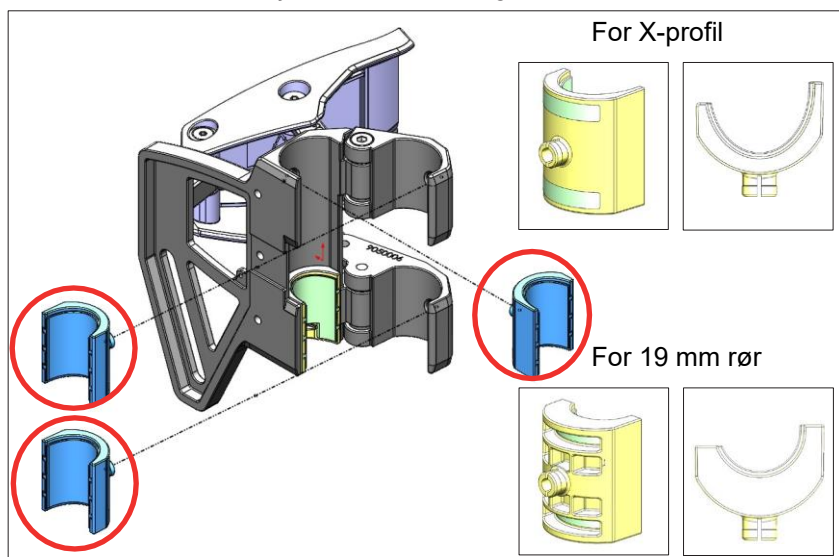

For X-profil

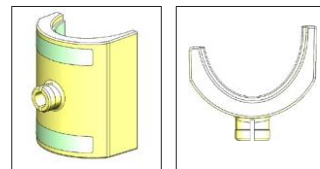

For 19 mm rør

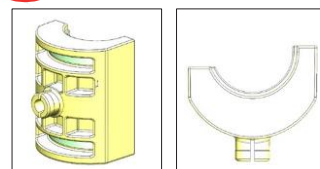

19a) Skifte ut symmetrisk, 3 per side. Bruk en dor og en gummihammer til å banke ut innsatsene. Kast de gamle innleggene og erstatt dem med nye. Det skal høres et klikk når de trykkes på plass.

Kontroller at de nye har en jevn gummioverflate.

Til X-profil: 9050021

Til 19-rørs profil: 9050024

For å koble til og fra Mototronik-enheten, se Mototronik-bruksanvisningen.